

特徴

1

カンジダ菌の検出が可能

他の細菌類の発育を抑制することで、選択的にカンジダ菌を検出することが可能です。

特徴

2

検査方法が簡便

綿棒で被験者の口腔粘膜等を拭い、アンプルに封入。その後は、恒温器へ入れるだけの簡単検査です。

特徴

3

短時間で判定

「赤色」陰性、「橙赤色」は疑陽性、「黄色」陽性と結果を視認しやすく、短時間(24時間)で判定結果が得られます。

原理

カンジダ菌の酸産生能を利用し、pH指示薬による色変化から目視で容易に判定できます。また、細菌発育抑制剤を添加しているため、カンジダ菌を選択的に検出することが可能です。

使用方法

1 ストマスタット綿棒にて口腔粘膜等より検体を採取します。

2 検体を採取した綿棒をアンプルに封入します。

3 恒温器37℃(±2℃)で、24時間培養します。

4 培養後のアンプルを色見本と比較して判定します。

判定結果

色			
	赤色	橙赤色	黄色
判別	陰性 (-)	疑陽性 (±)	陽性 (+)
<i>Candida albicans</i> の菌数 (菌数/mL)	検出限界 (約100)以下	約7.0×10 ³	約7.0×10 ⁵

ストマスタット 仕様

名称	ストマスタット
用途	カンジダ菌有無の判定 口腔衛生指導
包装	ストマスタットアンプル 30本 ストマスタット綿棒 30本 指導カード 30枚 ネームシール 30枚
品番	N12211602300
価格	¥7,200

* 仕様および外観の一部を予告なしに変更することがあります。

表示価格は、2011年12月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。

ご用命は

製造
販売元

デンツプライ三金株式会社

那須工場/〒324-0036 栃木県大田原市下石上 1382 番 11

東京本社 〒106-0041 東京都港区麻布台 1-8-10

札幌/TEL:011-222-4101 FAX:011-222-2344 名古屋/TEL:052-452-2151 FAX:052-452-2155
 仙台/TEL:022-373-5700 FAX:022-373-5133 大阪/TEL:06-6386-9350 FAX:06-6386-9374
 東京/TEL:03-5114-1002 FAX:03-5114-1036 福岡/TEL:092-411-6326 FAX:092-472-3880
 関東/TEL:03-5114-1003 FAX:03-5114-1036 登録センター/TEL:03-5114-1025 FAX:03-5114-1041

カスタマー・サービス・センター 受付時間:9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)  **0120-789-123** FAX:0120-789-129

<http://www.dentsply-sankin.com>